



PRODUCT NAME

REPARIL ICE-SPRAY

PRODUCT TYPE

LABEL

USE

SALE

LANGUAGE

D-A

COUNTRY

D-A

PRODUCT CODE

15627

CODE

PACK SIZE

157,1x156 mm

BARCODE - DATAMATRIX

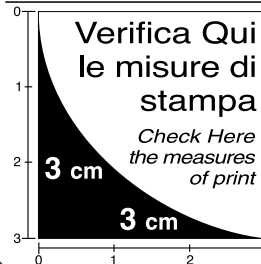
MIN. FONT SIZE

6 PT

COLORS: 5

BLACK**P. 354 C****P. 7732 C****P. 485 C****P. 7621 C****CUT DIE**DATE OF PREPARATION: **10-06-2022**

Cod. LG00735/14

POOLPRINT **GEBRAUCHSANWEISUNG****ZUSAMMENSETZUNG**

Butan, Pentan, Isobutan, Propan, Isopropylalkohol, Menthol, Campher. Mit einem angenehmen frischen Duft. Hinweis: Reparil® Ice-Spray Madaus enthält keine künstlichen Duft- oder Aromastoffe.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Zur wirksamen Kühlung von Prellungen, Verstauchungen, Muskelkrämpfen und Blutergüssen. Reparil® Ice-Spray Madaus ist als erste Hilfe besonders für stumpfe Sportverletzungen geeignet. Nicht auf Schleimhäute und offene Wunden auftragen. Reparil® Ice-Spray Madaus darf nicht mit den Augen in Berührung kommen.

DOSIERUNGSANLEITUNG, ART UND DAUER DER ANWENDUNG:

Reparil® Ice-Spray Madaus aus mindestens 15 cm Entfernung auf die betroffenen Hautpartien sprühen. Bei Bedarf kann Reparil® Ice-Spray Madaus mehrfach angewandt werden. Sprühen Sie nicht länger als fünf Sekunden auf eine Hautpartie (Gefahr von Erfrierungen). Nicht bei Säuglingen und Kindern unter sechs Jahren anwenden.

Hinweis zur Verwendung: Um eine einwandfreie Produktqualität und die ordnungsgemäße Funktion dieses Applikationssystems zu gewährleisten, darf an der Sprayflasche keine Manipulation vorgenommen werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinproduktes: Reparil® Ice-Spray Madaus darf nur bis zu dem auf dem Behältnis mit „verwendbar bis“ bezeichneten Datum verwendet werden. Reparil® Ice-Spray Madaus wird ohne Konservierungsmittel hergestellt und in das Behältnis mit einem speziellen Applikationssystem abgefüllt. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist daher eine Konservierung nicht erforderlich.

Stand der Information: Oktober 2020

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht in der Nähe von offenem Feuer verwenden und nicht auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hersteller:
Meda Pharma S.p.A. Via Valosa di Sopra, 9 - 20900 Monza - Italien

Vertrieb in Deutschland:
Viatrix Healthcare GmbH
Lütticher Straße 5, 53842 Troisdorf

Vertrieb in Österreich:
Mylan Österreich GmbH (A Viatrix Company), Guglgasse 15, 1110 Wien

CE 0297

Hochentzündlich



9 003516 040233



PZN -01881095

LOT

s. Bodenaufdruck

Verwendbar bis:
s. Bodenaufdruck

s. Bodenaufdruck

15627

**VIATRIS****VIATRIS**

Reparil® Ice-Spray Madaus

Zur Kühlung bei
SportverletzungenOhne künstliche
Duft- und Aromastoffe**Medizinprodukt**
200 ml Lösung zum Aufsprühen auf die Haut